

VISUS Leitfaden

DICOM E-Mail

Versand an die Ärztliche Stelle Westfalen-Lippe in connectMT
(ehem. Westdeutscher Teleradiologieverbund)

Stand 07 | 2023

VISUS Health IT GmbH
Gesundheitscampus-Süd 15
D-44801 Bochum

t +49 (234) 93693-200
support@visus.com

Hinweise zum Versand von einer Untersuchung an die Ärztliche Stelle

Bitte melden Sie sich mit einem Benutzer wie gewohnt am JiveX Mobile Client an. Dieser Benutzer muss autorisiert sein, Patientendaten vor dem Verschicken ändern zu dürfen. Selektieren Sie nun eine Studie



und betätigen Sie den DICOM E-Mail Button:

Nun muss zunächst in der unteren Ansicht die Studie selektiert und danach der „Bearbeiten“-Button betätigt werden.



☐ sende nur Key Images sende Befundtext mit	☐ sende Patientendaten anonymisiert sende Kurznotiz mit	Bearbeiten	Senden	Löschen	
Typ	Patientenname	Geburtsdatum	Studienbeschreibung	Studiendatum	Studiengröße (Bytes)
☒ Study	Max Mustermann	1900-01-01		2021-10-13	11.9 MB



☐ sende nur Key Images sende Befundtext mit	☐ sende Patientendaten anonymisiert sende Kurznotiz mit	Bearbeiten	Senden	Löschen	
Typ	Patientenname	Geburtsdatum	Studienbeschreibung	Studiendatum	Studiengröße (Bytes)
☒ Study	Max Mustermann	1900-01-01		2021-10-13	11.9 MB

Jetzt öffnet sich der Bearbeitungsmodus. Hier ist nun bei der **Patienten ID** als neuer Wert die von der Ärztlichen Stelle angegebene **Geräte ID (GID)** einzusetzen.

DICOM Mail					
Bearbeitungsmodus					
Geburtsdatum:	1900-01-01	Name:	Max Mustermann	Modalitäten:	US
Studienbeschreibung:		Studiendatum:	2021-10-13	Studienzeit:	11:26:16.000000
Patienten ID	DM_16341171764242	Neuer Wert			
		GID 12345			
Name	Max Mustermann	Max Mustermann			
Anwenden Abbrechen					



Nach der Änderung der Patienten ID klicken Sie auf den Button „Anwenden“, um diese Änderung zu speichern. Schließlich können Sie die Studie mit den veränderten Daten an die Ärztliche Stelle senden.

Im Mail-Dialog wählen Sie hierzu vor dem Versand die Ärztekammer Westfalen-Lippe aus:

☐	Ärztékammer Westfalen-Lippe	MedEcon Telemedizin	Ärztékammer Westfalen-Lippe	Münster	v
--------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	---------	--------------------------------

Hinweise zum Versand von mehreren Untersuchungen an die Ärztliche Stelle

Bitte melden Sie sich mit einem Benutzer wie gewohnt am JiveX Mobile Client an. Dieser Benutzer muss autorisiert sein, Patientendaten vor dem Verschicken ändern zu dürfen. Selektieren Sie nun mehrere Studien, indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten und mit der linken Maustaste alle Studien auswählen, die gesendet werden sollen.

Name	Geburtsdatum	Modalitäten	Studienbeschreibung	Studiendatum	Accession Number	Patienten ID	Studien...	E-Mail Absender	Anzahl Serien	Anzahl Bilder
001 DX 1 23 8	26.02.2019	DOC	JiveX Upload Report	22.05.2023	5C6330DA	DM_001 DX 1 23 8	07:52:44	JiveX Connect Upload	1	1
001 DX 1 23 8	26.02.2019	DX	JiveX Upload Report	26.02.2019	D35515CE	DM_001 DX 1 23 8	11:42:00	JiveX Connect Upload	23	184
123 123	01.04.2022	DOC	JiveX Upload Report	13.04.2022	B180C778	DM_test	08:50:08	JiveX Connect Upload	1	1
123 123	01.04.2022	DOC	Hallo Welt - Kopie (1810) - K...	13.04.2022	B180C778	DM_test	08:50:03	JiveX Connect Upload	1	1
1 1	11.11.1900	DOC	JiveX Connect Upload Report	23.01.2020	a9306a2e	DM_	15:32:34	JiveX Connect Upload	1	1
1 1	11.11.1900	DOC	a174ae5f-44db-4694-a554-9...	23.01.2020	a9306a2e	DM_	15:32:24	JiveX Connect Upload	1	1
3000 Bilder	01.01.1965	MR/DOC	Aortic arch	24.12.1995	380E406	DM_4068		JiveX Connect Upload	2	3001
@@@		DOC	JiveX Upload Report	14.06.2023	8F8B0E41	DM_55840841312	08:02:13	JiveX Connect Upload	1	1
@@@		MR/PRKO	JiveX Upload Report	10.05.2023	8F8B0E41	DM_55840841312	08:39:30	JiveX Connect Upload	11	918
Ackermann Kurt	01.01.1970	DOC	JiveX Upload Report	13.04.2022	5951AC53	DM_11624753563	15:42:57	JiveX Connect Upload	1	1
Ackermann Kurt	01.01.1970	DOC	JiveX Upload Report	13.04.2022	18A234A6	DM_11624753563	15:42:53	JiveX Connect Upload	1	1
Ackermann Kurt	01.01.1970	DOC	JiveX Upload Report	13.04.2022	7800CA32	DM_11624753563	15:24:29	JiveX Connect Upload	1	1
Ackermann Kurt	01.01.1900	CT	CT-Thorax/Abdomen + VA	21.08.2006	185494D	DM_11624753563	14:00:38	JiveX Connect Upload	1	56
Ackermann Kurt *	01.01.1900	DOC	JiveX Upload Report	13.04.2022	759FCE2A	DM_11624753563	13:56:28	JiveX Connect Upload	1	1
Ackermann Kurt *	01.01.1900	DOC	JiveX Upload Report	13.04.2022	D0E4AE5B	DM_11624753563	13:50:02	JiveX Connect Upload	1	1
Ackermann Kurt *	01.01.1900	DOC	JiveX Upload Report	13.04.2022	772BD944	DM_11624753563	09:18:48	JiveX Connect Upload	1	1
Ackermann Kurt *	01.01.1900	CT	CT-Thorax/Abdomen + VA	20.10.2007	C08797A0	DM_11624753563	16:23:21	JiveX Connect Upload	5	153
Anonymized	01.01.2000	DOC	JiveX Upload Report	19.05.2022	84D3BFA9	DM_0123456789	10:15:00	JiveX Connect Upload	1	1
Anonymized	01.01.2000	DOC	JiveX Upload Report	19.05.2022	18849262	DM_0123456789	09:40:21	JiveX Connect Upload	1	1
Anonymized	01.01.1901	SC	VARO-Patella-I	26.08.2003	33880959	DM_0001	16:28:58	JiveX Connect Upload	1	1
Anonymized	01.01.2000	MR		01.01.2000	7DFDBDE0	DM_0123456789	12:13:58	JiveX Connect Upload	1	20
Anonymized	01.01.2000	MR		01.01.2000		DM_0123456789	10:43:47	Radboudumc - Nottfall (Ra...	1	6
Anonymized Patient	01.01.1900	US	Sono Hüfte (bis 1. LJ)	10.07.2023	16889934931711	DM_16889934931732	14:51:33	Vestische Kinder- und Jug...	1	7
Anonymized Patient	01.01.1900	DX	Untersch rechts	10.07.2023	16889906466230	DM_16889906466231	14:04:08	MNZ Radiologie Nuklearm...	2	2

Danach betätigen Sie den DICOM E-Mail Button:

Im unteren Bereich müssen nun zunächst alle zu sendenden Studien selektiert und danach der „Bearbeiten“-Button betätigt werden.

☐ sende nur Key Images
☐ sende Befundtext mit

☐ sende Patientendaten anonymisiert
☐ sende Kurznotiz mit

☐
☐
☐

Typ	Patientenname	Geburtsdatum	Studienbeschreibung	Studiendatum	Studiengröße (Bytes)
☐	Study	1900-01-01	CT-Thorax/Abdomen + VA	2006-08-21	28.1 MB
☐	Study	1900-01-01	JiveX Upload Report	2022-04-13	15.7 KB
☐	Study	1900-01-01	JiveX Upload Report	2022-04-13	15.7 KB

☐ sende nur Key Images
☐ sende Befundtext mit

☐ sende Patientendaten anonymisiert
☐ sende Kurznotiz mit

☒
☒
☒

Typ	Patientenname	Geburtsdatum	Studienbeschreibung	Studiendatum	Studiengröße (Bytes)
☒	Study	1900-01-01	CT-Thorax/Abdomen + VA	2006-08-21	28.1 MB
☒	Study	1900-01-01	JiveX Upload Report	2022-04-13	15.7 KB
☒	Study	1900-01-01	JiveX Upload Report	2022-04-13	15.7 KB

Jetzt öffnet sich der Bearbeitungsmodus. Hier ist nun jeweils bei der **Patienten ID** als neuer Wert die von der Ärztlichen Stelle angegebene **Geräte ID (GID)** einzusetzen. Hinweis: Sollte die Geräte ID für alle zu sendenden Studien gleich sein, kann diese auch aus dem ersten Feld kopiert werden und in die anderen Felder per Copy/Paste eingefügt werden.

Bearbeitungsmodus

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Patientendatenschutz und für eilige Kommunikation

Geburtsdatum:	Studienbeschreibung:	Name:	Studiendatum:	Modalitäten:	Studienzeit:
1900-01-01	CT-Thorax/Abdomen + VA	Ackermann Kurt	2006-08-21	CT	14:00:38.000000
Patienten ID DM_11624753553 Neuer Wert GID 1234					
Name Ackermann Kurt Neuer Wert Ackermann Kurt					
1900-01-01	JiveX Upload Report	Ackermann Kurt *	2022-04-13	DOC	13:56:28.000000
Patienten ID DM_11624753553 Neuer Wert GID 1233					
Name Ackermann Kurt * Neuer Wert Ackermann Kurt *					
1900-01-01	JiveX Upload Report	Ackermann Kurt *	2022-04-13	DOC	13:50:02.000000
Patienten ID DM_11624753553 Neuer Wert GID 1232					
Name Ackermann Kurt * Neuer Wert Ackermann Kurt *					

Anwenden Abbrechen

Nach den Änderungen der Patienten ID klicken Sie auf den Button „Anwenden“, um diese Änderung zu speichern. Schließlich können Sie die Studie mit den veränderten Daten an die Ärztliche Stelle senden.

Im Mail-Dialog wählen Sie hierzu vor dem Versand die Ärztekammer Westfalen-Lippe aus:

☐ Aerztekammer Westfalen-Lippe MedEcon Telemedizin Aerztekammer Westfalen-Lippe Münster

