

Betreiber :			Messungen zur Konstanzprüfung Digitale Radiographie (DIN6868-4)																					
Raum:		Datum:																						
Gerät		Bezugs- wert	Toleranz		Mess-	ok.																		
AWG			von	bis	wert																			
Belichtungs-automatik	kV	Dosis																						
		Char. Pixelwert P9																						
		Dosisindikator																						
		Hochkontrast-Stufen		– 1 Stufe																				
		Niedrigkontrast-Stufen		– 1 Stufe																				
		Auflösung (Lp/mm)		– 1 Gruppe																				
		Störstellen		<i>keine</i>																				
Freie Belichtung	kV	Dosis																						
		Char. Pixelwert P9																						
		Dosisindikator																						
		Hochkontrast-Stufen		– 1 Stufe																				
		Niedrigkontrast-Stufen		– 1 Stufe																				
		Auflösung (Lp/mm)		– 1 Gruppe																				
		Störstellen		<i>keine</i>																				
	Dosisflächenprodukt																							
	Abstand Fok.-BE (cm)																							
Übereinstimmung von Sicht- und Nutzstrahlenfeld:																								
Abweichung $ a  +  b $ (re + li)			<i>max 2</i>																					
Abweichung $ c  +  d $ (ob + unt)			<i>max 2</i>																					
In Ordnung (Toleranzen eingehalten)?			ja/nein																					
Namenszeichen:																								
Bemerkungen:																								
				Einstelldaten siehe Bezugswert-Festlegung																				